

BRUKSANVISNING
Revaxør®
øredråper

Bruksområde
Revaxør øredråper løser opp ørevoks.

Ikke bruk Revaxør øredråper dersom

- øret er betent eller smertefullt
- det væsker fra øret
- ørets trommehinne er skadet, perforert eller punktert (f.eks. dren)
- du er allergisk (overfølsom) ovenfor noen av innholdsstoffene i Revaxør øredråper

Særskilte brukergreper
Dersom du har koordinasjonsproblemer, bevegelsesvansker eller skjelvende hender bør du be noen om hjelp til å dryppe Revaxør øredråper inn i ørekanalen din og til å skylle øret i etterkant, slik som beskrevet i bruksanvisningen.

Barn
Revaxør øredråper skal kun brukes hos barn etter legens anvisning. Følg bruksanvisningen nøye. Kontakt lege eller sykepleier dersom det er behov for øreskylning hos barn.

Brukere av høreapparat
Dersom du bruker høreapparat, må du vente med å sette tilbake høreapparatet til etter at øret er skylt og vannet har rent ut.

Mulige bivirkninger
I enkelte sjeldne tilfeller har lokal allergisk reaksjon oppstått etter bruk av Revaxør øredråper. Ubehagelig følelse i ørekanalen, hudirritasjon og forbigående svimmelhet kan oppstå. Tinnitus kan være et symptom på vokspropper, og forbigående tinnitus kan oppstå etter rens av ørene.

Ørets trommehinne kan skades dersom skylleballongen føres for dypt inn i ørekanalen.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger av Revaxør øredråper.

For å rapportere enhver alvorlig hendelse, kontakt produsenten og myndighet (Markedsovervåking av medisinsk utstyr, Tlf. +47 22 89 77 00) i landet hvor brukeren er. Dette er viktig for den pågående overvåkingen av nytte/risikoforholdet til produktet.

Slik bruker du Revaxør øredråper og skylleballong

- Oppløsning av vokspropp med øredråper
- Varm flasken i hånden i et par minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (ca. 37°C).
 - Legg hodet på siden og drypp 10-20 dråper Revaxør øredråper inn i øret. Trekk øreflippen forsiktig opp og ned et par ganger, i en sirkulær bevegelse. Dekk til ytterst i øret med litt bomull som fuktes med noen dråper Revaxør øredråper.
 - La Revaxør øredråper virke i 20 – 60 minutter. Ved behov kan du la Revaxør øredråper virke over natten.

Etter bruk av Revaxør øredråper må øregangen skylles. Du kan bruke Revaxør skylleballong, eller ta kontakt med lege eller sykepleier for øreskylning. Spesielt hos barn anbefales det at øreskylning utføres av lege eller sykepleier.

- Øreskylning med skylleballong
- Skylleballongen skal rengjøres før hvert bruk.
 - Sug opp lunkent vann i skylleballongen.
 - Putt spissen på skylleballongen noen millimeter inn i øregangen og skyll øret ved å klemme rolig og forsiktig på skylleballongen.

Putt ikke spissen på skylleballongen dypt inn i ørekanalen!

- Gjenta behandlingen noen ganger til skyllevannet er helt rent.
- Rengjør skylleballongen og klem den tom etter hver behandling. La den stå med spissen ned, slik at de siste dråpene renner ut.

Hvis ikke ørevoksproppen løses opp, kan du gjenta behandlingen i tre påfølgende dager ved behov.
Husk å skylle øret med vann fra skylleballongen etter hver behandling.
Vennligst følg instruksjonene fra lege eller sykepleier, dersom du har oppsøkt helsepersonell for øreskylning.

Øreskylning skal ikke være smertefullt. Dersom du får smerter, må du avslutte øreskylningen og kontakte lege.

 Unngå kontakt med øynene. Skyll øynene med rikelig mengder vann ved behov og kontakt lege.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av Revaxør øredråper.

Innhold
Allantoin (3 mg/ml), lanolin etoksyliert, polysorbat 80, polysorbat 60, sorbitol flytende, fruktosesirup, polyoksyetylenstearyleter, polyoksyetylenoleyeter, lanolinolje, isopropylmyristat, riskliolje (Oryza Sativa), fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroksytoluen, sorbinsyre, bensetonklorid, vann.
Skylleballong: Polyvinylklorid (PVC)

Oppbevaring
Oppbevares ved høyst 25°C.
Oppbevar Revaxør øredråper og skylleballongen utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Produktet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Restene skal leveres til apoteket. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Pakningsstørrelser
Revaxør øredråper 10 ml
Prosedyresett: Revaxør øredråper 10 ml med skylleballong

Tilvirker
Revaxør øredråper:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland



Skylleballong:
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Tyskland



Tilvirker av prosedyresett
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Distributør i Norge
Orion Pharma AS

Besøksadresse
Sandakerveien 130
NO-0484 Oslo
Norge

Postadresse
Postboks 4366 Nydalen
NO-0402 Oslo
Norge
Tel. +47 4000 4210
www.orionpharma.no

Denne bruksanvisning ble sist oppdatert 04/2025

 Medisinsk utstyr

 Les bruksanvisningen før bruk

 Advarsel

 Tilvirker

 Tilvirkningsland

 Distributør

 Oversettelse

 25 °C
Øvre temperaturgrense

 Bruk innen

 Batch

 Unik utstyrsidentifikasjon