

BRUKSANVISNING

Revaxør® ørevoksløsende øredråper

Bruksområde

Revaxør øredråper løser opp ørevoks og forebygger forekomst av vokspropper.

Ikke bruk Revaxør®

- dersom øret er betent eller smertefullt
- dersom det væsker fra øret
- dersom ørets trommehinne er skadet, perforert eller har vært punktert (f.eks. dren)
- dersom du er allergisk (overfølsom) ovenfor noen av innholdstoffene i Revaxør

Særskilte brukergrupper

Dersom du har koordinasjonsproblemer, bevegelsesvansker eller skjelvende hender bør du be noen om hjelp til å dryppe Revaxør øredråper inn i ørekanalen din og til å skylle øret i etterkant, slik som beskrevet i bruksanvisningen.

Barn

Revaxør skal kun brukes hos barn etter legens anvisning. Følg bruksanvisningen nøye. Kontakt lege eller sykepleier dersom det er behov for øreskylling hos barn.

Brukere av høreapparat

Dersom du bruker høreapparat, må du vente med å sette tilbake høreapparatet til etter at øret er skylt og vannet har rent ut.

Mulige bivirkninger

I enkelte sjeldne tilfeller har lokal allergisk reaksjon oppstått etter bruk av Revaxør. Ubehaglig følelse i ørekanalen, hudirritasjon og forbigående svimmelhet kan oppstå. Tinnitus kan være et symptom på vokspropper, og forbigående tinnitus kan oppstå etter rens av ørene.

Ørets trommehinne kan skades dersom skylleballongen føres for dypt inn i ørekanalen.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger av Revaxør.

Slik bruker du Revaxør® øredråper og skylleballong

Oppløsning av vokspropp med øredråper

- Varm flasken i hånden i et par minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (ca. 37 °C).
- Legg hodet på siden og drypp 10-20 dråper Revaxør inn i øret. Trekk øreflippen forsiktig opp og ned et par ganger, i en sirkulær bevegelse. Dekk til ytterst i øret med litt bomull som fuktes med noen dråper Revaxør.
- La Revaxør virke i 20 – 60 minutter. Ved behov kan du la Revaxør virke over natten.

Etter bruk av Revaxør øredråper må øregangen skylles. Du kan bruke Revaxør skylleballong, eller ta kontakt med lege eller sykepleier for øreskylling. Spesielt hos barn anbefales det at øreskylling utføres av lege eller sykepleier.

Øreskylling med skylleballong

- Skylleballongen skal rengjøres før hver bruk.
- Sug opp lunkent vann i skylleballongen.
- Putt spissen på skylleballongen noen millimetre inn i øregangen og skyll øret ved å klemme rolig og forsiktig på skylleballongen.

- **Putt ikke spissen på skylleballongen dypt inn i ørekanalen!**
- Gjenta behandlingen noen ganger til skyllevannet er helt rent.
- Rengjør skylleballongen og klem den tom etter hver behandling. La den stå med spissen ned, slik at de siste dråpene renner ut.

Hvis ikke ørevoksproppen løses opp, kan du gjenta behandlingen i tre påfølgende dager ved behov. Husk å skylle øret med vann fra skylleballongen etter hver behandling. Vennligst følg instruksjonene fra lege eller sykepleier, dersom du har oppsøkt helsepersonell for øreskylling.

Bruk av Revaxør skal ikke være smertefullt. Dersom du får smerter må du avslutte øreskyllingen og kontakte lege.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av Revaxør.

Innhold

Allantoin, lanolin etoksyleret, polysorbat 80, polysorbat 60, sorbitol flytende, fruktosesirup, polyoksyetylenstearyleter, polyoksyetylenoleyeter, lanolinolje, isopropylmyristat, riskliolje (*Oryza Sativa*), fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroksytoluen, sorbinsyre, bensenklorid, vann.
Skylleballong: Polyvinylklorid (PVC)

Oppbevaring

Oppbevares ved høyst 25 °C.
Oppbevar Revaxør øredråper og skylleballongen utilgjengelig for barn.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Pakningsstørrelser

Revaxør øredråper 10 ml
Revaxør øredråper 10 ml med skylleballong

Tillvirker

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Representant i Norge

Orion Pharma AS
Tlf.: +47 40 00 42 10
norweb@orionpharma.com

Denne bruksanvisning ble sist oppdatert 11.9.2020.





Medisinsk utstyr